



WIDEX SOUND ASSIST



SOUND LIKE NO OTHER



TEE VIELÄKIN HELPOMMAKSI SINULLE TÄRKEIDEN ÄÄNIEN KUULEMINEN

Widex Sound Assist on kuin kuulokojeiden 'Swiss Army knife' -mahtuu hyvin käteen. Sitä voidaan käyttää monisuuntaisena pöytämikrofonina, lisämikrofonina yksittäisissä keskusteluissa, handsfree-laitteena, äänen suoratoistolaitteena digitaalisista ja analogisista lähteistä ja jopa kuulokojeiden kaukosäätimenä. Widex Sound Assist tarjoaa myös T-ohjelman, joiden avulla kuulokojeen käyttäjä voi käyttää suoratoistoa induktiosilmukan kautta.



Apua tarjotaan MOMENT-sovelluksen kautta

Sovelluksen kautta on helppo hallita esimerkiksi äänenvoimakkuutta ja äänen tasapainoa eri tiloissa. Tarjolla on myös oppaita "Pariliitoksen muodostaminen", "Miten aloitat käytön" ja apua "kysymysten ja vastausten" kautta.

SOUND ASSIST AUTTAA LUKEMATTOMISSA TILANTEISSA



- **Lisämikrofoni**
Yksittäiset keskustelut perheenjäsenten ja ystävien kanssa kuuluvat selvästi, missä tahansa oletkin.
- **Monisuuntainen pöytämikrofoni**
Helpompi seurata ja kuulla tärkeissä kokouksissa, vilkkailla illallisilla ja ryhmäkeskusteluissa.
- **Handsfree-puhelut**
Loistava ääni ääni puheluissa.
- **Suoratoisto kaikista Bluetooth-laitteista**
Suoratoista musiikkia, elokuvia tai TV-ääntä kuulokojeisiisi.
- **Kaukosäädin Widex MOMENT Bluetooth -kuulokojeille.**
Helppo säätää äänen voimakkuutta.
- **Induktiosilmukka**
Mahdollisuus käyttää induktiosilmukkaa, vaikka kuulokojeissasi ei olisi sitä.

TEKNISET TIEDOT

- Pariston käyttöikä: 10 tuntia (sekalainen käyttö)
- Täyteen ladattu: 3 tuntia
- Li-ion akku
- Micro-USB-laturi
- Koko: 43 x 43 x 16 mm
- Paino: 32 g



TUTUSTU SOUND ASSISTIIN

Widex Sound Assist on kuin kuulokojeiden ‘Swiss Army knife’. Se voi olla pöytämikrofoni, sitä voi käyttää lisämikrofonina kahdenkeskisissä keskusteluissa, se mahdollistaa handsfree-puhelut, suoratoistot digitaalisista ja analogisista lähteistä ja se voi jopa toimia kuulokojeiden kaukosäätimenä. Widex Sound Assist tarjoaa myös T-ohjelman, jonka avulla kuulokojeen käyttäjä voi käyttää suoratoistoa induktiosilmukan kautta.



MUODOSTA PARILIITOS SOUND ASSISTIN JA KUULOKOJEIDEN VÄLILLE

KUULOKOJEEN PARILIITOS:

Widex Sound Assist on yhdistettävä kuulokojeisiisi ennen kuin yhdistät sen muihin laitteisiin, kuten älypuhelimeen tai tietokoneeseen.

- Varmista, että Widex Sound Assist on pois päältä, ja käynnistä kuulokojeet uudelleen. Kuulokojeet ovat pariliitostilassa 3 minuutin ajan.
- Pidä äänenvoimakkuus + (3) ja on/off-painiketta (6) painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo palaa sinisenä (1).
- Kuulokoje ja Sound Assist saavat olla enintään 1 metrin päässä toisistaan.
- Pariliitos käynnistyy automaattisesti, ja merkkivalo (1) vilkkuu lyhyesti vihreänä, kun pariliitos on valmis.

Widex Sound Assist voidaan yhdistää vain yhteen kuulokojeeseen kerrallaan. Jos haluat muodostaa pariliitoksen uuteen kuulokojeeseen, sinun on suoritettava samat vaiheet kuin edellä.

PARILIITOS MUIHIN LAITTEISIIN:

- Pidä äänenvoimakkuus + (3) ja on/off-painiketta (6) painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes merkkivalo palaa sinisenä (1).
- Kuulokoje ja Sound Assist saavat olla enintään 1 metrin päässä toisistaan.
- Pariliitos käynnistyy automaattisesti, ja merkkivalo (1) vilkkuu lyhyesti vihreänä, kun pariliitos on valmis.

Widex Sound Assist voidaan liittää pariin enintään 8 Bluetooth-laitteen kanssa ja yhdistää aktiivisesti 1 Bluetooth-laitteeseen.

PIKAOPAS

Voit käynnistää **Widex Sound Assistin** ja sammuttaa sen painamalla on/off-painiketta (6) ja pitämällä sitä painettuna 2 sekunnin ajan.

Vaihtaminen laitetilojen välillä

- Varmista, että laite on käynnistetty.
- Paina lyhyesti on/off-painiketta (6) vaihtaaksesi laitteen eri tilojen välillä.
- Aktiivisen tilan kohdalla on merkkivalo.



Nykyinen tila näkyy kolmessa valaistussa tilan ilmaisimissa (6).

Säädä suoratoistoääntä

Säädä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti äänenvoimakkuuspainiketta+ (3) tai äänenvoimakkuuspainiketta- (4).

Kuinka Widex Sound Assistia käytetään

Käytä integroitua metallikiinnikettä (8) tai mukana tulevaa kaulalenkkiä.

Aktivoi painikelukitus vahingossa tapahtuvan säätämisen välttämiseksi

- Paina äänenvoimakkuus + (3) ja ohjelmapainiketta (5) samanaikaisesti painikkeiden lukitustoiminnon aktivoimiseksi ja deaktivoimiseksi.
- Aktiivisen tilan merkkivalo (1) vilkkuu kaksi kertaa osoittaakseen, että painikkeet on lukittu tai vapautettu.

Lataaminen

Käytä mukana toimitettua mikro-USB-kaapelia Widex Sound Assistin lataamiseen. Täyden latauksen saaminen vaatii 3 tunnin latauksen.

ULKOINEN MIKROFONI

Lisämikrofoni

- Kun kumppani/ystävä/puhuja käyttää Sound Assistia, kyseisen henkilön ääni lähetetään automaattisesti suoraan kuulokojeisiin.

Pöytämikrofoni

- Paina lyhyesti on/off-painiketta (6) valitaksesi pöytämikrofonitilan (7).
- Kun mikrofonitilan merkkivalo (7) palaa vihreänä, pöytämikrofoni on aktiivinen.
- Parhaat tulokset saavutetaan, kun Widex Sound Assist asetetaan tasaiselle alustalle.

Jos haluat keskittyä tiettyyn henkilöön, voit lukita mikrofonin kiinteään asentoon ja kohdistaa sen manuaalisesti henkilöön, jota haluat kuunnella.

- Pidä painiketta (2) painettuna, kunnes yläosan merkkivalo (1) palaa jatkuvasti vihreänä.
- Kohdista Widex Sound Assist siihen henkilöön, johon haluat keskittyä.
- Paina painiketta (2) uudelleen ja pidä sitä alhaalla avataksesi kiinteän kuuntelusuunnan lukituksen.

Mikrofoniäänen mykistäminen

Mykistä kuulokojeen mikrofonit suoratoiston aikana ympäristön melun estämiseksi.

- Pidä äänenvoimakkuuspainiketta - (4) painettuna vähintään 3 sekunnin ajan mykistääksesi kuulokojeen mikrofonit.
- Pidä äänenvoimakkuuspainiketta + (3) painettuna kytkeäksesi kuulokojeen mikrofonit päälle.

BLUETOOTH-SUORATOISTO

- Paina lyhyesti on/off-painiketta (6) valitaksesi Bluetooth-tilan (Bluetooth-kuvake) (7).
- Kun Bluetooth-kuvake (7) on vihreä, Bluetooth-tila on aktiivinen.

Handsfree-puhelut

Vastaa puheluihin tai hylkää ne Widex Sound Assistin avulla, joka suoratoistaa puhelut mistä tahansa älypuhelimesta kuulokojeisiisi.

SAAPUVAT PUEHUT

Vastaa	Voit vastata puheluun painamalla lyhyesti painiketta (2).
Lopeta	Paina lyhyesti painiketta (2).
Hylkää	Pidä painiketta (2) painettuna noin 2 sekunnin ajan.

LÄHTEVÄT PUEHUT

Soita	Aloita puhelu manuaalisesti pariliitetyllä puhelimella tai käytä puhelimen ääniohjausta. Kun puhelu on käynnissä, äänesi kuuluu Widex Sound Assistin mikrofonien kautta.
--------------	--

Ääniohjauksen käyttö

- Varmista, että Widex Sound Assist on yhdistetty Bluetooth-laitteeseen, jossa ääniohjaus on käytössä.
- Pidä painiketta (2) painettuna 2 sekunnin ajan ja anna äänikomento.

Äänen suoratoisto

Suoratoista ääntä mistä tahansa Bluetooth-laitteesta kuulokojeisiisi. Valitse Widex Sound Assist laitteesi Bluetooth-valikosta tai aseta molemmat laitteet pariliitostilaan pariliitoksen sallimiseksi.

Käynnistä/tauko	Paina lyhyesti painiketta (2)
Seuraava	Paina painiketta (2) kahdesti.
Lopeta	Paina painiketta (2) kolme kertaa.

Kaukosäädin

Kun Sound Assistia ei käytetä suoratoistoon, sitä voidaan käyttää kuulokojeiden kaukosäätimenä ohjelmien ja äänenvoimakkuuden vaihtamiseen.

Aktivoi kaukosäädin valitsemalla Bluetooth-tila.

Vaihda ohjelmia

Paina lyhyesti ohjelmapainiketta (5) vaihtaaksesi kuulokojeesi ohjelmaa. Jos kuulokojeeseesi on ohjelmoitu Zen+-ohjelma, pääset niihin painamalla pitkään ohjelmapainiketta (5). Paina sitten lyhyesti ohjelmapainiketta (5) päästäksesi Zen-tilan valintaan.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Lisää äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti äänenvoimakkuuden lisäspainiketta (3) ja vähennä äänenvoimakkuutta painamalla lyhyesti äänenvoimakkuuden vähennyspainiketta (4).



SUORATOISTO INDUKTIOSILMUKAN KAUTTA

Widex Sound Assist voi suoratoistaa induktiosilmukasta, kun se on T-ohjelma tilassa.

- Paina lyhyesti on/off-painiketta (6) valitaksesi T-ohjelman tilan kuvakkeen.
- Kun T-ohjelma tila (7) on vihreä, induktiosilmukka on aktivoitu.
- Voit käynnistää ja keskeyttää suoratoiston induktiosilmukan kautta painamalla lyhyesti painiketta (2).



SOUND LIKE NO OTHER



Widex on WIDEX A/S:n rekisteröity tavaramerkki.
Painanut Rosendahls a/s. 2022-11.
90067-1-W-FI-1222 Widex Moment Sheer Sound Assist M65

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. App Store on Apple Inc:n tavaramerkki.

Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

